


Antigen-Selbsttests für Schüler*innen

Das braucht man dazu:

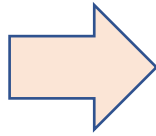

Testkassette



Stäbchen
mit Tupfer



Fläschchen
mit Lösung

So funktioniert's:

1

Wir öffnen den Karton und legen alle **drei Teile** auf unseren **Tisch**.



2

Wir nehmen die **Testkassette** aus der Packung und schreiben unseren **Namen darauf**.




3

Wir stellen das **Fläschchen** in die **Wäscheklammer** und öffnen das Fläschchen.



4

Wir nehmen das **Stäbchen** aus der **Verpackung**.

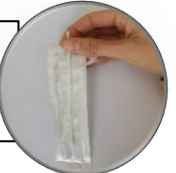

5

Wir stecken das **Stäbchen** nur **2cm** in das **linke Nasenloch**, bis man die Watte nicht mehr sieht.



6

Wir **drehen** den Tupfer **5 Mal im Kreis** an der Nasenwand entlang.



7

Wir stecken den Tupfer 2cm tief in das **rechte Nasenloch** und drehen den Tupfer **5 Mal im Kreis** an der Nasenwand entlang.



8

Wir stecken das **Stäbchen** in das **Fläschchen** und **drehen 10 Mal** und drücken den Tupfer **gegen die Röhren-Wand** und den **Röhren-Boden**.



9

Wir **drücken** das Röhren **5 Mal zusammen** und ziehen das Stäbchen aus dem Röhren.



10

Das Stäbchen **legen** wir **auf die Verpackung**.



11

Wir **schließen** das **Fläschchen** und drehen danach den **oberen Verschluss auf**.




12

Wir drehen das Fläschchen um und geben **5 Tropfen** in die **Vertiefung „S“**.



13

Wir bleiben auf unserem Platz sitzen und **warten**, bis wir unsere Testkassette auf das Tablett legen können.

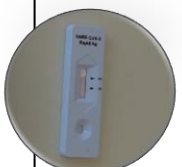

14

Meine Lernbegleiterin läuft mit dem Tablett umher und wenn sie bei mir angekommen ist, **lege ich meine Testkassette auf das Tablett**.

